

RETICULÓCITOS

Material de Coleta

1,0 mL de Sangue total (EDTA)

Preparo do paciente

Jejum não necessário.

Descrição do Exame

Contagem de Reticulócitos

Método

Coloração Azul de cresyl brilhante

Consevação

Refrigerado 2 a 8°C : 24 horas

Interferentes

Hemólise

Valor de Referência

0,2 - 1,5%.

Interpretação

É útil no diagnóstico diferencial das anemias, como índice da capacidade regenerativa eritróide. Os reticulócitos encontram-se aumentados nas anemias hemolíticas, devido ao aumento da eritropoese, nas anemias por perda de sangue, antes da deficiência de ferro, e no início de terapêutica específica de algumas anemias, como a megaloblástica e a causada por carência de ferro. Por outro lado, a quantidade de reticulócitos diminui nas anemias aplásticas, ferroprivas e megaloblásticas (antes do tratamento) e também na insuficiência renal.

Setor

Hematologia