

PESQUISA DE FUNGOS

Material de Coleta

Urina 1º jato, secreções de feridas, escarro, descamação de lesões de unha, pele e pêlos, escarro, abscesso, líquido sinovial, pleural, ascítico, liquor.

Preparo do paciente

Suspender o uso de antifúngico tópico ou outra medicação tópica por uma semana. Não usar hidratantes, perfumes, desodorantes ou substâncias de qualquer natureza no dia da coleta.

Descrição do Exame

Micológico de direto Fungos

Método

Microscopia, KOH 20%

Consevação

Refrigerada 2 a 8°C: até 48 horas - Secreção vaginal, uretral, urina, líquidos corporais, secreção de feridas, escarro, punção de linfonodos e abscessos. Temperatura ambiente : até 14 dias - Descamação de pele, pêlos e unhas.

Interferentes

Coleta inadequada, material insuficiente, medicação tópica, antifúngico, perfumes, desodorantes.

Valor de Referência

Negativo.

Interpretação

Positivo: presença de fungos filamentosos ou leveduriformes.

Setor

Microbiologia